

Бандаж на грудную клетку ПО-К1

Особенности:

- для мужчин
- воздухо- и влагопроницаемый материал
- "антискручивающие" вставки
- анатомическая форма
- регулируемые по длине ляжки

Показания к применению:

- реабилитация после операций на грудной клетке
- снижение риска разрыва шовных лигатур
- перелом ребер
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Как использовать:

- максимально плотно оденьте бандаж на грудную клетку (без возникновения болевых ощущений)
- отрегулируйте длину плечевых лямок и закрепите их для поддержки бандажа
- при необходимости (кашель, физическая нагрузка, любое действие связанное с расширением грудной клетки) увеличьте степень компрессии (утяжки) с помощью широкого ремня с пластиковой рамкой на конце, потянув за него и, при достижении необходимой степени фиксации, закрепив на бандаже (постарайтесь избегать резких движений, степень компрессии (утяжки) должна повышаться плавно, без возникновения болевых ощущений)
- в состоянии покоя верните утягивающий ремень в исходное положение, бандаж примет исходное состояние
- немедленно прекратите использование бандажа в случае возникновения болевых ощущений и проконсультируйтесь с лечащим врачом

Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- синдром портальной гипертензии
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие

Рекомендации:

ручная стирка при t 30°С, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку



Размер	S	M	L	XL
	55-75	70-95	90-115	110-135

Инструкция по применению:

- максимально плотно оденьте бандаж на грудную клетку
- отрегулируйте длину плечевых лямок и закрепите их для поддержки бандажа
- плавно подтяните утягивающий ремень (без возникновения болевых ощущений)

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Состав:

- хлопок - 37%
- полиамид - 56%
- эластан - 7%

Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Рекомендации по уходу

